

# ★作業用フェイスシールド★

粉塵や水滴飛沫などを防ぐ保護具

## ◆同梱内容(1セット)

フレーム 1本



シールド 1枚




(写真は完成状態)

全体図



## ◆フレームとシールドの組み立て方

①シールドを開く。

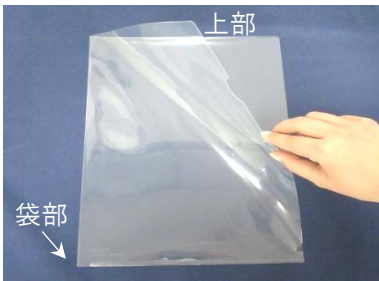

②シールドの袋部を三角に折る。



③袋部を持って上部に向けて三角に折り曲げる。



④袋部の角をホッチキスで留める。



⑤フレーム左右端のプラスチック部分にシールド上部端を合わせて差し込む。



⑥完成。



## ◆使用方法

※フレームのワイヤー部は、ご使用者の頭部にあわせて曲げられます。

※シールドの下部は袋状になっております。ご使用に合わせて上部をカット出来ますがシールドを切る際は十分ご注意ください。



### △ 安全上の注意

- 1)本品は微小な粉塵や水滴等の飛沫が顔にかかるのを防ぐことを目的としていますが、使用者の目や身体の損傷を完全に防ぐものではありませんのでご注意ください。
- 2)シールドは使い捨てです。  
キズ・汚れ等があると視界が遮られ、  
思わぬ事故を引き起こす原因となりますので使用を控えてください。
- 3)滅菌等を行っていませんので衛生環境で利用する場合、  
フレームは使用時にアルコールや次亜塩素酸水などでの消毒を行ってください。
- 4)シールドの縁(外周の切断面)で皮膚を傷つける等の  
怪我をすることがありますのでご使用の際は十分ご注意ください。

材質

- ・フレーム :SUSワイヤ材・ABS樹脂
- ・透明シールド:クリアーホルダー  
(ポリプロピレン)

製品に関するお問合せ

株式会社小松精機工作所  
長野県諏訪市四賀大字942番地の2  
Tel 0266-52-6100  
フェイスシールドプロジェクトチーム